

# Arbeitsanleitung

## Aufbereitung von Desco Wipes und Eco Wipes Vliestuchspender mittels DESOTEX® Aufbereitungstücher

Dr. Schumacher

Vor jeder Wiederbefüllung eines Desco Wipes und Eco Wipes Mehrweg-Vliestuchspenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Neben möglichen chemothermischen und thermischen Verfahren ist die manuelle Aufbereitung mittels DESOTEX® Aufbereitungstüchern möglich. Jeder Nachfüllpackung liegen die DESOTEX® Aufbereitungstücher bei. Es wird empfohlen, den Vliestuchspender vor der Aufbereitung einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender abzutauschen. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter [www.bgw-online.de](http://www.bgw-online.de)). Die VAH-Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion<sup>1</sup> und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die

Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil“<sup>2</sup> sind zu beachten. Im Falle eines mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

<sup>1</sup> Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion

<sup>2</sup> Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil



### REINIGUNG ①

①

Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen.

②

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.

③

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.



### DESINFEKTION ②

①

Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen.

②

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.

③

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.

